





Instructions for use Quick Clean™ Microwave Bags

Bruksanvisning Quick Clean™ Rengöringspåsar för mikrovågsugn

Brugsanvisning Quick Clean™ Poser til mikrobølgeovn

Käyttöohjeet Quick Clean™ Mikropuhdistuspussi

Bruksanvisning Quick Clean™ Poser for rengjøring i Microovn

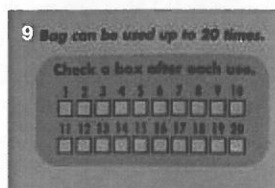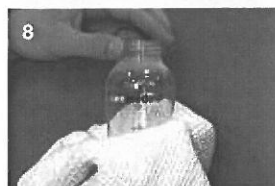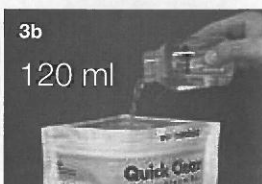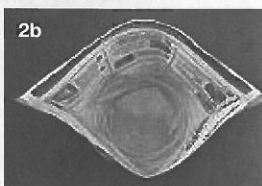

CS

Quick Clean™

Sterilizační sáčky do mikrovlnné trouby

- Pro všechny následující popsané postupy čištění používejte výhradně kvalitní pitnou vodu.
- Jednotlivé části odsávačky čistěte ihned po použití, abyste předešli zasněžení zbytků mléka a následnému množení bakterií.
- Dodržujte následující pokyny, pokud Vám lékař či porodní (laktiční) asistentka nesdělí jiné instrukce.

Do jednoho sáčku lze vložit buď

- 1 prsní nástavec, ventil, membránu, lahev na mléko a uzávěr nebo
- 2 prsní nástavce, ventily a membrány nebo
- 2 lahve na mléko a uzávěry nebo
- hadičky odsávačky

1. Rozložte jednotlivé díly a důkladně omyjte v teplé mýdlové vodě. Důkladně opláchněte čistou vodou.

2a. Vložte buď

- 1 prsní nástavec, ventil, membránu, lahev na mléko a uzávěr nebo
- 2 prsní nástavce, ventily a membrány nebo
- 2 lahve na mléko a uzávěry do sáčku.

2b. Odsávací hadičky položte přímo na dno sáčku. Do sáčku s hadičkami nepřidávejte žádné další části.

3a. Pro prsní nástavce, ventily a membrány nebo lahve na mléko: Přilejte do sáčku 60 ml vody.

3b. Pro hadičky odsávačky: Přilejte do sáčku 120 ml vody. Přesvědčete se, že jsou hadičky zcela ponořeny ve vodě.

- Přidáním čajové lžičky kyseliny citrónové do vody zamezíte usazování vodního kamene.
- Nelijte do sáčku méně nebo více vody než je vyše uvedeno.
- Při použití méně než 60 ml/120 ml může dojít k deformaci umělohmotných částí.

4. Pevně uzavřete sáček. Umístěte sáček do středu otočného talíře. Nepokládejte sáček na kovovou mřížku, která někdy bývá součástí mikrovlnné trouby.

5. Sterilizujte v mikrovlnné troubě dle jejího výkonu po dobu:

1,5 minuty při 1100 W+	3 minuty při 800 – 1100 W	5 minut při 500 – 700 W
------------------------	---------------------------	-------------------------

Ohřívání po dobu delší než je doporučeno může způsobit deformaci umělohmotných částí. Nemá-li Vaše mikrovlnná trouba otáčecí talíř, otočte sáček v polovině zahřívací doby.

6. V tepelně izolujících rukavicích opatrně vyjměte sáček z mikrovlnné trouby.

7. Před otevřením sáčku vylijte vodu odpařovací štěrbinou. **Upozornění** Při vyjímání sáčku z mikrovlnné trouby a při jeho otevření může unikat horká voda nebo pára (nebezpečí spálení).

8. Vyjměte části ze sáčku a osušte je čistou utěrkou. Jestliže vyčištěné díly nejsou používány, uložte je do čistého sáčku, který důkladně uzavřete nebo do krabice s víkem. Případně lze čisté díly zabalit do čistého papíru nebo utěrky.

9. Sáček smí být použit maximálně 20x. Prohlédněte po každém použití.

Upozornění

- Sáček je určen ke sterilizaci pouze částí z umělé hmoty, která je odolná proti mikrovlnám.
- Píst a válec manuálních odsávaček Medela nelze sterilizovat v mikrovlnné troubě.

Upozornění

- Parní čištění může způsobit změnu barvy součástí nebo zamlžení hadiček, což ale nemá vliv na správnou funkci výrobku.
- Sáček nevkládejte do konvenční pečicí trouby nebo do grilu pečicí trouby.
- Řiďte se pokyny návodu Vaší mikrovlnné trouby.