

Kojenecká váha LUVION Exact – 65

Kojenecká váha LUVION Exact 65 - nový model kojenecké váhy LUVION. Neocenitelný pomocník při zjišťování hmotnosti u předčasně narozených dětí nebo u dětí, které mají problémy s přibýváním na váze.



Technické údaje:

- provozní teplota cca 10 – 40°C
- provozní vlhkost <80%
- maximální kapacita 20kg
- minimální kapacita 100g
- rozlišení stupnice 5g
- zdroj: 4 x AAA baterie
- indikátor vybitých baterií L o
- indikátor chyby/závady/poruchy Err
- volba měřící jednotky kg/lb
- paměť pro poslední naměřené hodnoty
- funkce automatického vypnutí po 5min
- modré podsvícení displeje

Funkce tlačítek:

- ON/Z – zmačknutím dojde k aktivaci váhy a zahájení procesu vážení. Pro vynulování údajů je třeba zmačknout tlačítko znovu, dojde k vyčištění displeje a v levém spodním rohu se ukáže signalizátor „0“. Pro úplné vypnutí váhy je nutné podržet tlačítko o dobu cca 3 sekund.
- MODE – toto tlačítko se používá pro změnu měřící jednotky. Zmačknutím tlačítka si zvolíte kilogramy nebo libry. Indikátor zvolených měřících jednotek se zobrazuje v pravé části LCD displeje.
- MEM – pokud je váha ve vynulovaném stavu, lze zmačknutím tohoto tlačítka vyvolat údaje uložené po posledním vážení. Dojde k rozsvícení odpovídajícího indikátoru. Pokud je během vážení tlačítko zmačknuto do pozice „SET“, dojde k uložení pouze naměřené ustálené hodnoty.

Obsluha:

- Vložte baterie, zmáčkněte tlačítko ON/Z a vyčkejte, až se objeví „0.00“
- Opatrně položte miminko na váhu, naměřená hodnota se objeví během několika sekund. Pokud miminko zůstane ležet na váze i poté, co se objevila naměřená hodnota, tato hodnota se bude ukazovat po dobu 5 minut a následně se váha automaticky vypne.
- Pokud sundáte miminko z váhy ihned po naměření dané hodnoty, váha se vrátí do stavu „0.00“ a po 5 minutách se automaticky vypne, pokud v daném rozmezí nezahájíte nové vážení.
- Pokud si chcete prohlédnout poslední naměřenou hodnotu, použijte tlačítko „MEM“. Váha musí být v dané chvíli v pozici „0.00“. Váha uchovává hodnotu z každého posledního vážení.

Upozornění:

- Váha musí být umístěna na pevném rovném povrchu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost miminka.
- Jakmile se na displeji objeví indikátor vybití baterií „L o“, je nutné baterie vyměnit.
- Udržujte váhu v čistotě, aby bylo zajištěno její správné fungování.
- Vyjměte baterie, pokud nebudete váhu používat po delší dobu.
- Miminko pokládejte na prostředek váhy, abyste zabránili váhovým odchylkám.
- Přetížení váhy (nad 20,5 kg) je striktně zakázáno.

Výhradní distributor pro ČR:

BABYWELT.cz

Dvorecká 359/4, 14700 Praha 4 -Podolí

www.babywelt.cz, info@babywelt.cz

tel. 734 500 744